



Sairaala | Hoito | Kotihoito | [Henkilönostimet](#) | Opastus ja huolto

## Nova liikuteltava henkilönostin – aina helposti saatavilla

Nova liikuteltava henkilönostin on tehty hoitotyön eri nostolanteisiin, kuten nostoihin tuolista, sängystä tai lattialta. Pyörillä varustettu henkilönostin liikkuu kevyesti, on aina saatavilla ja siirtyy helposti huoneesta toiseen. Hoitotyön ergonomiaa lisäävä, kestävä ja turvallinen apuväline sekä nostettavalle että avustajalle.

# Monipuolinen, helppokäyttöinen ja ergonominen

Nova liikuteltava henkilönostin auttaa arkirutiineissa henkilöitä, joiden voimat ja liikkuvuus ovat rajoittuneet. Henkilönostin on monipuolinen apuväline, jota käytetään nostotyössä, kuten nostettaessa ylös sängystä, lattialta, toiletista ja pyörätuolista tai niihin takaisin. Nostimen harkittu muotoilu saa sen tuntumaan käytössä varmalta ja turvalliselta ja tekee siitä erilaisiin ympäristöihin soveltuvan, helposti puhdistettavan apuvälineen. Nostimessa on sähköisesti toimiva portaaton alarungon jalkojen leveyden säätö riittävän laajalla säätövälillä. Nostopuomin nostoalue on todella laaja: 42 - 177 cm. Nostimen toimintoja hallitaan helppokäyttöisellä käsiohjaimella.



#### Nostopuomin laaja nostoalue

Nostopuomin riittävän laaja nostoalue mahdollistaa myös lattialta nostot.

#### Nostokaaren vaihdot pikalukituksella

Nopeat vaihdot, mahd. 5 erilaista nostokaarta kuten kattonostimessakin.

#### Huolellinen muotoilu

Tärkeät toiminnot kuten hätäkatkaisin, hätälasku ja lataus löytyvät heti. Lataus verkkoyhteyksellä.

#### Portaaton alarungon jalkojen levitys

Sähköisesti toimiva alarungon jalkojen levitys säätää alarungon portaattomasti V-asentoon.

Nova henkilönostimen linjakaassa muotoilussa yhdistyy kaunis ulkoasu hyvään käytettävyyteen ja ergonomiaan.

#### Tuote

Nova 300 liikuteltava henkilönostin

#### Nro

16020102

# Nova nostokaaret

Nova nostokaaret ovat markkinoiden kevyimmät. Niitä on helppo käsitellä ja puhdistaa. Kaikissa nostokaarissa on turvallinen pikalukitus, joka helpottaa vaihdettaessa mallista toiseen. Kaikki Nova nostokaaret soveltuvat käytettäväksi katto-, vapaasti seisovissa ja liikuteltavissa henkilönostimissa.

## Varusteet



2-pisteen nostokaari, leveys 30 cm  
Tuotenumero 81560



2-pisteen nostokaari, leveys 45 cm  
Tuotenumero 81561



2-pisteen nostokaari, leveys 50 cm  
Tuotenumero 81562



4-pisteen nostokaari 50 x 25 cm  
Tuotenumero 81563

4-pisteen nostokaarta käytetään, kun tarvitaan riittävästi tilaa ylävartalolle. Neljä kiinnityskohtaa tuovat nostoon lisävakausta. Paino jakautuu suuremmalle pinta-alalle, mikä lisää nostettavan mukavuutta.



4-pisteen nostokaari 50 x 40 cm  
Tuotenumero 81564

Laajempi malli avaa lantionkulmaa vielä enemmän verrattuna pienempään malliin. Tämä nostokaari antaa yleisesti suuremman "takakenoasennon" liinoihin.



Seinäpidike  
Tuotenumero 81568

Seinäpidike nostokaarien ja liinojen säilytystä varten.

HUOM. 4-pisteen nostokaarta ei käytetä matalan nostoliinan kanssa.

## Tekniset tiedot



**Nova vaaka**  
Tuotenumero 81569  
Digitaalivaaka, max 350 kg,  
Etac Nova 100 nostomoottoriin ja  
Nova 300 henkilönostimeen.

|                                     |   |                                |
|-------------------------------------|---|--------------------------------|
| Nostettavan enimmäispaino:          | 180 kg                                  |                                |
| Nostoalue:                          | 42-177 cm                               |                                |
| 80 kg:n nostoja                     | n. 80 kpl kerralatauksella              |                                |
| Alarungon jalkojen leveys           | 64-108 cm/ulkomitta, 52-96 cm/sisämitta |                                |
| Pyörien ø                           | 100 mm                                  |                                |
| Alarungon korkeus:                  | 14,5 cm                                 | Täyttää seuraavat vaatimukset: |
| Alarungon pituus:                   | 110 cm                                  | ISO 10535:2006                 |
| Kääntösäde:                         | n. 126 cm                               | EN 60601-1                     |
| Kokonaispaino:                      | 42,2 kg                                 | EN 60601-1-2                   |
| Runko:                              | pulverimaalattua terästä                | EN 60068-2-32                  |
| Turvaluokka, moottori/ohjausyksikkö | IP43                                    | MDD 93/42/EEC                  |
| Turvaluokka, kaukosäädin/akku       | IP65                                    |                                |



# Nova henkilönostimet – kehitetty hoitotyön erilaisiin tarpeisiin

Joka kolmas hoitotyössä ilmoitettu työtapaturma aiheutuu raskaasta nostamisesta. Peräti seitsemän hoitajaa kymmenestä pitää työtään raskaana. Tämä on asia, johon haluamme vaikuttaa. Yhteistyössä hoitotyön ammattilaisten kanssa Etac on kehittänyt Nova henkilönostinkokonaisuuden, johon sisältyvät nostoapulaitteet, nostokoulutus ja hoitohenkilöstön henkilökohtainen tuki.

Nostintuoteryhmä tarjoaa kustannuksiltaan edullisen malliston, joka mahdollistaa investoinnit paremman työympäristön hyväksi hoitoalan työpaikoilla. Käyttämällä sopivia apuvälineitä oikein ja oikeissa paikoissa voidaan raskaat nostot minimoida. Nova-tuoteperhe on harkittu kokonaisuus, joka käsittää liikuteltavat henkilönostimet, liikuteltavat seisontanosto- nostimet, katonostinkokonaisuudet, vapaasti seisovat nostimet sekä nostokaaret ja -liinat.

Etac tekee myös tulevaisuudessa aktiivista kehitystyötä, ettei kenenkään hoitohenkilöstöön kuuluvan enää tänä päivänä tarvitsisi sairastua enneaikaisesti raskaiden potilasnostojen vuoksi. Asiantuntijamme ovat palveluksessanne ja kartoittavat mahdollisuudet juuri teidän työympäristönne parantamiseksi.

Henkilönostimien lisäksi Etac kehittää ja valmistaa apuvälineitä henkilöille, joiden liikuntakyky on alentunut.

**Enemmän tietoja Nova henkilönostimista: [www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)**

Myynti, asennus- ja huoltopalvelut:



**STIEGLMEYER**

**Stieglmeyer Oy**

Ahjokatu 4 B, 15800 Lahti

Puh. (03) 753 6320

Faksi (03) 753 6330

[stieglmeyer@stieglmeyer.fi](mailto:stieglmeyer@stieglmeyer.fi)

[www.stieglmeyer.fi](http://www.stieglmeyer.fi)

Valmistaja:

**etac®**